



Températures d'utilisation : de 10°C à 40°C
Températures de stockage : de -20°C à 70°C
Utilisation : Produit à usage unique quel que soit le résultat

quand se tester ?

PAS TROP TÔT ! Attendre 10min après la dernière ingestion d'alcool ou d'autres substances (spray, médicaments...) avant d'effectuer un test. L'alcoolémie maximale est atteinte 45min à 60min après le dernier verre d'alcool.

précautions

- S'assurer que la date de validité inscrite sur l'emballage n'est pas dépassée
 - Ne pas utiliser un test dont le réactif est rouge avant usage
 - Attention fragile : tube en verre
 - Tenir hors de portée des enfants et des animaux
 - Ne pas porter le tube à la bouche
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau
 - En cas d'ingestion, appelez le 15 ou le 112
 - Ne pas mettre les tests usagés en contact avec les textiles
 - Ne pas vider le tube de son réactif chimique
 - Ne pas faire passer l'air à plusieurs reprises à travers le réactif
 - Ne pas diriger le tube vers soi lors du dégonflage. Diriger le tube vers le sol
- A jeter dans une poubelle après utilisation en raison de la présence de produits chimiques contenus dans l'éthylotest
- Le fabricant et ses distributeurs dégagent toute responsabilité si le produit est utilisé en dehors de sa destination ou si les précautions et le mode d'emploi ne sont pas respectés

un risque d'accident exponentiel

- Avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,10 mg/L d'air soit 0,2 g/L de sang, l'alcool commence à influencer votre comportement et vos réflexes.
- Avec une alcoolémie de 0,25 mg/L d'air soit 0,5 g/L de sang, votre risque d'accident est multiplié par 3
- Avec une alcoolémie de 0,40 mg/L d'air soit 0,8 g/L de sang, votre risque d'accident est multiplié par 10




Caractéristiques certifiées selon la Norme NFX 20-702:2014

- Aptitude à l'usage
- Qualités métrologiques

ÉTHYLOTEST CHIMIQUE 01/01 ETHYSC - 0,25L LNE, 1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris - FRANCE - www.marque-nf.com



contralco
 TESTS ET CONTRÔLES CERTIFIÉS
 BP23 - 34150 GIGNAC - FRANCE
 www.contralco.com - info@contralco.com
 Produit fabriqué en France
 Brevet et marque déposés

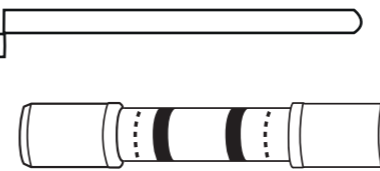

Test 0,25 mg/L d'air
 soit 0,5 g/L de sang

SORTEZ LE TUBE

Utilisation ÉTHYLOTEST À USAGE UNIQUE.

BIEN PRENDRE CONNAISSANCE DES 6 ÉTAPES AVANT DE COMMENCER LE TEST !



1 **SORTEZ**

le tube



2 **PERCUTEZ**

en pressant
 les deux côtés



3 **GONFLEZ**

en une fois
 le ballon (*)



4 **INSEREZ**

le tube sur le ballon



5 **DÉGONFLEZ**

entièrement le ballon
 en 15 secondes environ
 puis retirer le tube



6 **PRENEZ**

le tube
 dans la main (**)

Gardez le tube en main
 selon la durée indiquée
 par la couleur de la
 pastille ci-contre.
 Blanc : 1min - Rouge : 3min

(*) AVERTISSEMENT : Le souffle doit être continu et sans interruption.
 (**) Vous devez constater un échauffement du tube.

Bien lire le résultat !

OUVREZ LA MAIN ET REGARDEZ IMMÉDIATEMENT LES CRISTAUX !

- **Coloration ROUGE = POSITIF :** alcoolémie supérieure ou égale à 0,25 mg/L d'air. **VOUS NE DEVEZ PAS CONDUIRE.**
- **Pas de coloration ROUGE = NÉGATIF :** alcoolémie inférieure à 0,25 mg/L d'air

Le réactif peut se colorer en rouge plusieurs minutes après la lecture du résultat.
 Cela signifie que votre alcoolémie n'est pas à ZERO. IL EST CONSEILLÉ DE NE PAS CONDUIRE.

Résultat non opposable aux contrôles légaux.
 Les décisions prises par l'utilisateur sont de sa seule et entière responsabilité quel que soit le résultat du test.

